

Canine Distemper Virus Antigen Test CDV Ag Test

Samo za upotrebu u veterinarskoj dijagnostici



Bioguard Canine Distemper Virus (CDV) Ag Test je imunohromatografski test, koji je razvila i proizvela Bioguard Corporation, za brzo i kvalitativno otkrivanje virusa štenecaka u očnom i nosnom iscedku pasa. Test uređaj ima ispitni prozorčić sa nevidljivom T (test) zonom i C (kontrolnom) zonom. Kada se uzorak stavi u otvor za uzorak na uređaju, reagens poteče postrance na površinu test membrane. Ukoliko se u uzorku nalazi dovoljna količina antigena virusa štenecaka, pojaviće se vidljiva T traka. C traka će se uvek pojaviti nakon nanošenja uzorka, ukazujući na valjanost rezultata. Na ovaj način uređaj može tačno da ukaže na prisustvo antigena virusa štenecaka u uzorku.

SAHRŽAJ KITA


KOMPONENTE	5 TESTA/PAKOVA NJE	10 TESTA/PAKOV ANJE
CDV Ag test uređaj	5	10
Kapaljka za jednokratnu upotrebu	5	10
Epruveta sa testnim puferom	5	10
Sterilni štapić za bris	5	10
Uputstvo	1	1

UZORAK

Očni i nosni iscedak.


TEST PROCEDURA

- Izvaditi zatvorenu kesicu, epruvetu sa puferom i sterilni bris iz kutije.
- Izvaditi test uređaj iz folije i staviti ga vodoravno na čistu površinu.
- Sakupiti očni i nosni iscedak psa brisom, tako da se bris dobro natopi iscedkom.
- Otvoriti poklopac priložene epruvete sa puferom. Umetnuti bris sa uzorkom u epruvetu i mešati. Protresti da se obezbedi dobro rastvaranje uzorka u puferu.
- Postepeno ukapati 4 kapi (100 µL) ekstrahovanog uzorka u otvor za uzorak pomoću priložene pipete (obratiti pažnju na talog koji može da zapuši pipetu).
- Očitati rezultat za 5-10 minuta. Rezultat posle 10 minuta nije validan za očitavanje.

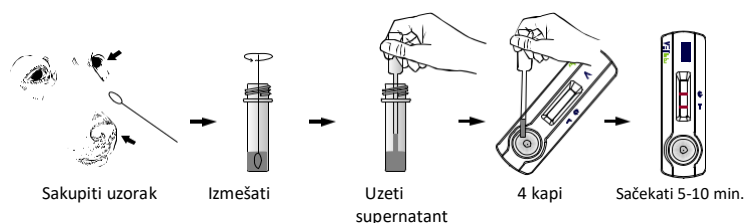

TUMAČENJE REZULTATA

- 1) Pozitivan:** Prisustvo i C i T trake, bez obzira da li je T traka jasna ili nejasna.
- 2) Negativan:** Pojava samo jasne C trake.
- 3) Nevažeci:** Ne pojavljuje se obojena traka u C zoni, bez obzira da li se T traka pojavila.

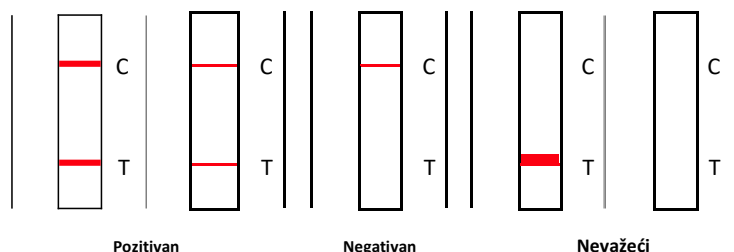

ČUVANJE

- Kitove čuvati na temperaturi 2-30°C. NE ZAMRZAVATI.
- Ne držati test kit izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Test kitovi su stabilni do isteka roka upotrebe (24 meseci) označenog na foliji pakovanja.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Za najbolje rezultate, tačno se pridržavati uputstva za upotrebu.
- Obratiti pažnju na rok upotrebe označen na foliji pakovanja pre upotrebe. Ne koristiti kitove sa isteklim rokom upotrebe.
- Ne vaditi kit iz folije pakovanja sve do trenutka upotrebe, jer u slučaju da je kit prekomerno izložen vazduhu i na njega deluje vlaga iz vazduha sav postupak manipulacije treba završiti u roku od jednog sata od otvaranja pakovanja.
- Sve komponente test uređaja u kutiji, uključujući kit, kapaljku, pufer i bris su za jednokratnu upotrebu. Ne koristiti ponovo. Nakon upotrebe pažljivo ukloniti sve uzorke i kitove u skladu sa Dobrom laboratorijskom praksom (DLP).
- Ne pomerati test membranu nakon nanošenja uzorka u otvor za uzorak da se na njoj ne bi pojavile abnormalne pojave.
- Komponente u ovom kitu su ispitane u kontroli kvaliteta kao standardna jedinica serije. Ne mešati komponente iz različitih serija.

OGRAIČENJA

Test je samo za veterinarsku upotrebu i in vitro diagnostiku, i nije u stanju da isključi sve mogućnosti lažno negativnih i lažno pozitivnih rezultata uzrokovanih različitim faktorima. Stoga, pored rezultata testa, veterinari bi trebalo da razmotre i druge kliničke informacije i laboratorijske dijagnostičke metode kako bi postavili konačnu dijagnozu u praksi.



6F, No.20-1, Wu-Kong 5th Rd, New Taipei Industrial Park, New Taipei City 24890, Taiwan
TEL : +886-2-5591-6688 FAX : +886-2-6625-8182 <http://www.bioguard.com.tw>